

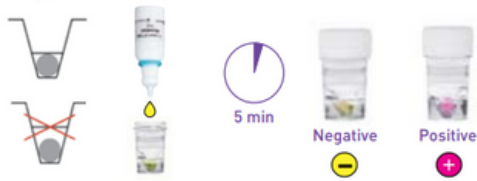



Быстрые уреазные тесты от компании Biohit, Финляндия

Наименование	UFT - 300 (жидкий) 	HPQT (гелевый) 
РУ №	№ РЗН 2018/6996 от 02.04.2018 г.	№ ФСЗ 2010/06345 от 02.03.2010 г.
Форма выпуска	Раствор во флаконе-капельнице 15 мл = 300 капель	50 пластиковых планшет с гелем
Расход теста	1 капля на 1 биопат	1 планшет
Чувствительность Специфичность Точность	93,8% 97,4% 96,4%	93,7% 87,7% 96%* Vauhkonen M, Helse T et al. Helicobacter 2008; 13 (5): 473
Четкая цветовая индикация	Желтый - пурпурный	Желтый - красный
Положительная реакция	На 2 минуте	На 1-2 минуте
Отрицательная реакция	До 5 минут	До 30 минут
Выполнение теста	<p>Внести биопат в пробирку Добавить 1 каплю раствора из флакона Оценить результат на 5 минуте экспозиции</p> 	<p>Погрузить биоптаты в гель Оценить положительный результат через 1-2 минуты</p> <p>Отрицательный результат оценить на 30 минуте экспозиции</p> 
Температура хранения	+18 +25°C	+2 +8°C