




erbe

power your performance.





# Эндоскопия: Режимы и настройки

# Режимы endoCUT I/Q: обзор и настройки

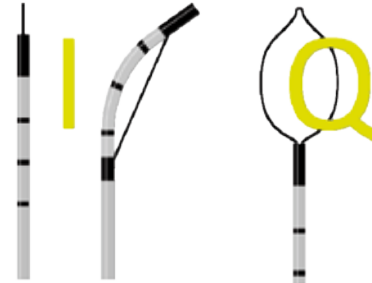

Скачать настройки

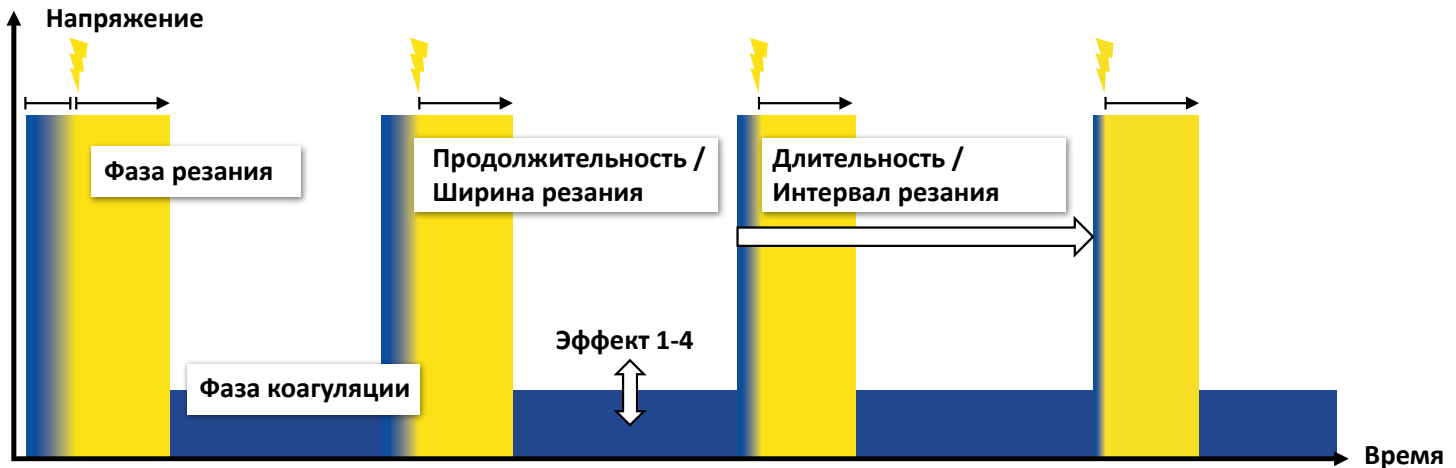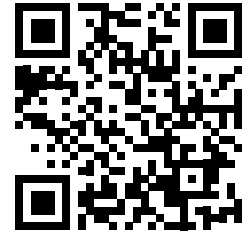


# Режимы endoCUT I/Q: обзор и настройки

## Эффект (1 - 4)


### Интенсивность фазы коагуляции



Эффект 1

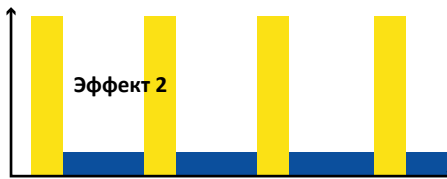


Эффект 2

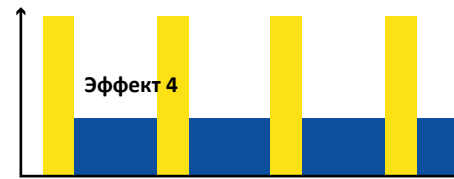


Эффект 4

## Продолжительность / Ширина резания (1 - 4)

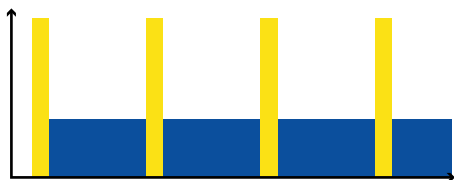

Продолжительность 1

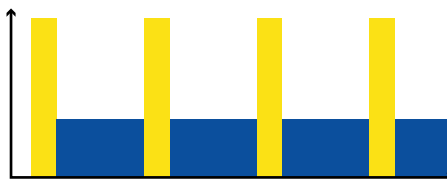


Продолжительность 2




Продолжительность 4


## Длительность / Интервал резания (1 - 10)

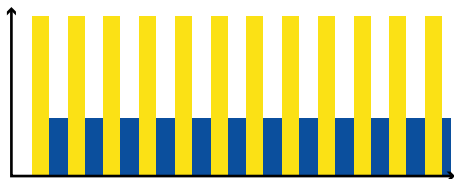

Длительность 1

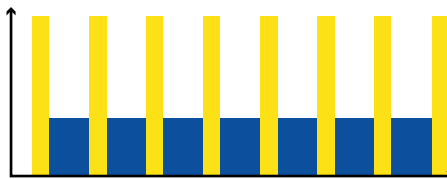

Длительность 5

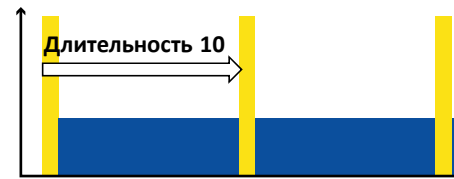

Длительность 10

# Коагуляция: типы и режимы

Глубокая, без искрообразования



**softCOAG**

Лучший режим для гемостаза  
щипцами (граспером)


Поверхностная, с искрообразованием




**forcedCOAG**  
**swiftCOAG**



Свойства режимов коагуляции

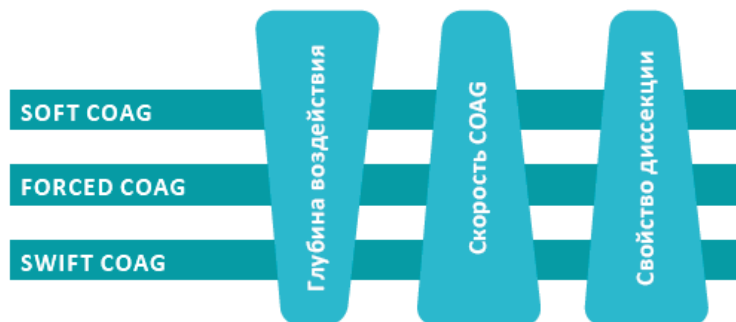

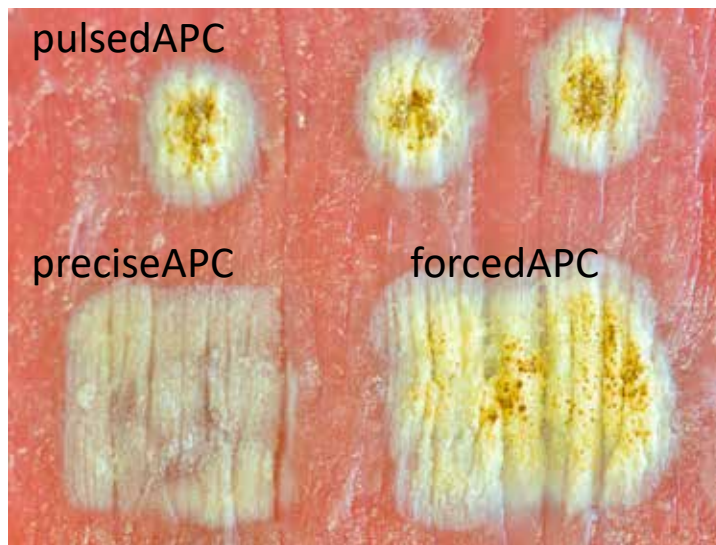

## Факторы определяющие степень воздействия АПК на ткань

1. Время активации




2. Режим, мощность, эффект



3. Рабочее расстояние от зонда



Больше об АПК

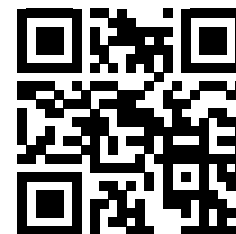

[fiapc.erbe-med.com](http://fiapc.erbe-med.com)

# АПК зонды: информация для заказа

erbe



Прямое направление потока плазмы



Поток плазмы	Диаметр, мм	Длина, м	Артикул
Прямой	∅ 1,5 мм	1,5 м	20132-220
Прямой	∅ 1,5 мм	3 м	20132-226
Прямой	∅ 2,3 мм	2,2 м	20132-221
Прямой	∅ 2,3 мм	3 м	20132-223
Прямой	∅ 3,2 мм	2,2 м	20132-222

Боковое направление потока плазмы



Поток плазмы	Диаметр, мм	Длина, м	Артикул
Боковой	∅ 2,3 мм	2,2 м	20132-224

Циркулярное направление потока плазмы



Поток плазмы	Диаметр, мм	Длина, м	Артикул
Циркулярный	∅ 2,3 мм	2,2 м	20132-225

# Настройки для режимов Erbe



Режимы Резания		Режимы Коагуляции		
<b>Полипэктомия/EMR</b>				
endoCUT Q	<b>Пищевод, желудок, прямая кишка</b> Эффект 3, Продолжительность 1, Длительность 6	<b>Модель коагулятора</b>	<b>Erbe VIO 3</b>	<b>Erbe VIO 200/300 D/S</b>
		softCOAG (гемостаз) forcedCOAG	Эффект 6 Эффект 4	Эффект 3-6 35-50 Вт Эффект 2-3 35-50 Вт
	<b>Тонкая кишка</b> Эффект 2, Продолжительность 1, Длительность 6	softCOAG (гемостаз) forcedCOAG	Эффект 6 Эффект 4	Эффект 3-6 35-50 Вт Эффект 2-3 35-50 Вт
	<b>Слепая/ободочная кишка</b> Эффект 1-2, Продолжительность 1, Длительность 6	softCOAG (гемостаз) forcedCOAG	Эффект 6 Эффект 3	Эффект 3-6 35-50 Вт Эффект 2-3 35-40 Вт
<b>Диссекция в подслизистом слое/ESD</b>				
endoCUT I	Эффект 3, Продолжительность 3, Длительность 3	softCOAG (гемостаз) forcedCOAG swiftCOAG	Эффект 6 Эффект 4-5 Эффект 3-5	Эффект 3-6 35-50 Вт Эффект 2-3 35-50 Вт Эффект 2-3 35-50 Вт
<b>Папиллотомия</b>				
endoCUT I	Эффект 2, Продолжительность 3, Длительность 3	softCOAG (гемостаз) forcedCOAG	Эффект 5-6 Эффект 3-4	Эффект 3-6 30-50 Вт Эффект 2-3 30-50 Вт
<b>Пероральная эндоскопическая миотомия/РОЕМ</b>				
endoCUT I	Эффект 2, Продолжительность 3, Длительность 3	softCOAG (гемостаз) swiftCOAG	Эффект 6 Эффект 3-5	Эффект 3-6 35-50 Вт Эффект 2-3 35-50 Вт
<b>Аргонплазменная коагуляция (АПК)</b>				
		Стандартный: <b>forcedAPC</b>	Эффект 3	20-50 Вт
		Абляция: <b>pulsedAPC</b>	Эффект 4	Эффект 2 40-50 Вт
		GAVE: <b>pulsedAPC</b>	Эффект 3	Эффект 2 10-30 Вт

erbe

power your performance.

ООО «Эрбэ Электромедицин»

Адрес представительства:

119270 Москва

ул. Хамовнический вал, 12

Телефон +7 (495) 256-00-52

[info@erbe-russia.com](mailto:info@erbe-russia.com)

[erbe-russia.com](http://erbe-russia.com)

[medical-videos.com](http://medical-videos.com)